



musa

A E S T H E T I C



SKIN



Las mas novedosa tecnología para un procedimiento estético no invasivo, no doloroso y con un mínimo tiempo de recuperación.





como funciona

Máquina que combina Radiofrecuencia Fraccionada con agujas de oro y Crioterapia. Esta tecnología aumenta la temperatura en la capa mas profunda de la piel llamada dermis, a través de cabezales de 64, 25 o 10 microagujas de oro sobre una base de cristal desechable.

El aumento de la temperatura que produce MUSA Skin estimula la producción de colágeno y ácido hialurónico. Las microagujas poseen un rango de penetración desde 0,2 mm hasta 4,0 mm. la potencia del equipo varia desde 60 a 110 watts. Los parametros de MUSA Skin le permitirá tratar diferentes areas del cuerpo, como cara, cuello, pecho, brazos, glúteos y piernas.



resultados

- ✔ Levantamiento facial
- ✔ Disminución de arrugas y líneas de expresión
- ✔ Mejora la apariencia y textura de la piel
- ✔ Reduce la flacidez
- ✔ Elimina las cicatrices del acné
- ✔ Reduce la apariencia de estrías





Tres maneras para los mejores resultados en diferentes áreas del cuerpo



La estimulación mecánica de los microagujas de oro, junto con los efectos biológicos y la estimulación térmica generados por la radiofrecuencia, estimulan conjuntamente el sistema de autorreparación de la piel, promoviendo el metabolismo, mejorando la microcirculación e iniciando la regeneración y reorganización del colágeno.

La penetración de las microagujas de oro, abre el canal de absorción rápida de la piel, lo que facilita el ingreso de los medicamentos y productos de belleza a la piel.



El efecto de usar una temperatura más baja que la temperatura de la superficie del cuerpo para la mejora terapéutica se llama CRIOTERAPIA.

Los efectos de la aplicación de Crioterapia con el Mango de Frío son:

Vasoconstricción: se produce un poro más cerrado, por lo que se ve una notable mejoría en la piel.

Fortalece la fibra de colágeno: hace la piel más firme y elástica, suaviza las arrugas y las patas de gallo.

Reduce eficazmente las venas varicosas, las venas finas flotantes y los desechos dañinos con reflujo venoso son más fáciles de purificar y desintoxicar, lo que tiene un efecto significativo en la dilución y eliminación de la placa.

Reduce la tasa metabólica: reduce la piel roja, hinchazón, dolor, especialmente alergias de la piel.



La energía de radiofrecuencia emitida puede destruir selectivamente las glándulas sebáceas y apocrinas del folículo piloso, inhibir la respuesta inflamatoria y activar el sistema de reparación antiinflamatorio.

La destrucción selectiva de las glándulas sebáceas es el tratamiento fundamental para el acné. Puede ser tratado con un promedio de 3 sesiones. Es apropiado para los pacientes quienes no han recibido tratamiento médico. Después del tratamiento, casi no hay piel seca ni reacciones alérgicas. Casi sin efectos secundarios. Reduce el tiempo de tratamiento y recurrencias del acné.



características técnicas

Frecuencia de salida	2 – 4 M
Potencia de salida	10 – 200 W
Voltaje de entrada	AC 110V – 220V – 50Hz/60Hz
Especificación de cartón de aviación	53X41X41 CM 14 KG
Especificación del cartón de la carretilla	44X36X85 CM 13 KG





En **MUSA** contamos con la tecnología mas novedosa a su servicio para que pueda ayudar a sus pacientes con esa apariencia indeseada de marcas o arrugas en la piel.

